



JAK POUŽÍVAT CELOX PPH

Přípravek CELOXTM PPH se používá, pokud poporodní krvácení nereaguje na počáteční léčbu, jako je masáž dělohy, objemová náhrada a standardní léčba uterotonickými a antifibrinolytickými prostředky.



V návodu k použití naleznete úplné informace o použití CELOXTM PPH a úplný seznam kontraindikací, varování a bezpečnostních opatření.

Před aplikací

- Ujistěte se, že pacientka nemá žádné kontraindikace pro použití systému CELOXTM PPH.
- Po porodu císařským řezem se ujistěte, že uterotomie je uzavřena před transvaginální aplikací CELOXTM PPH.
- Před tamponádou dělohy přípravkem CELOXTM PPH se ujistěte, že byla z dělohy odstraněna veškerá tkáň placenty, krevní sraženiny nebo membrány.
- Před aplikací CELOXTM PPH odstraňte veškeré prostředky, které vyvíjí vnější tlak na dělohu (např. přitlačné podložky).

Aplikace

- Roztrhněte obal v odtrhávacích zářezech. Během zavádění dodržujte sterilní techniku aplikace sterilního přípravku CELOXTM PPH.
- Umístěte pacientku do litotomické polohy a pomocí zrcadla uchopte atraumatickým nástrojem děložní čípek a atraumatickou pinzetou postupně vložte rozkládací CELOXTM PPH až k fundu děložní dutiny. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Použijte ultrazvukové navádění, pokud je k dispozici, abyste zajistili aplikaci CELOXTM PPH do místa (míst) krvácení a abyste minimalizovali nebezpečí poškození děložní stěny.
- Pokud ultrazvuk není k dispozici, použijte externí manuální palpaci, abyste se vyhnuli poranění děložní stěny během zavádění CELOXTM PPH.
- Umožněte prostředku CELOXTM PPH, aby se během aplikace rozvíjel vně pacientky.
- Ponechte dostatečnou délku vyčnívajícího konce každého CELOXTM PPH přes děložní čípek a pochvu, aby bylo možné následné odstranění.
- Po dosažení hemostáze lze přebytečný CELOXTM PPH odříznout od konce vyčnívajícího z pochvy (s ponecháním dostatečné délky každého CELOXTM PPH, aby byl viditelný a umožňoval odstranění).

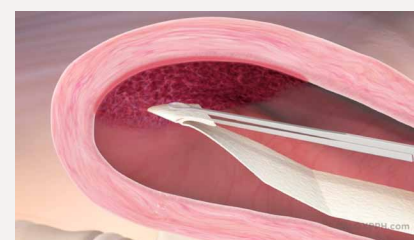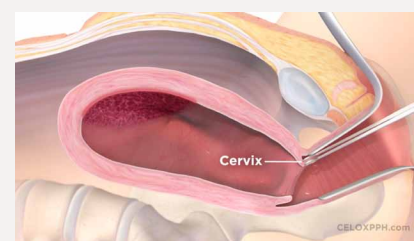


- Pro každou pacientku použijte alespoň jeden CELOX[™] PPH a před aplikací jej neřežte ani netrhejte, protože můžete zvýšit riziko ponechání útržků materiálu v děloze.
- V průběhu léčby použijte maximálně 2 prostředky CELOX[™] PPH na pacientku.
- CELOX[™] PPH se musí dostat do kontaktu s místem (místy) krvácení.

- V případě potřeby může být pochva vyplněna sekundárními sterilními obvazy/gázou (NE CELOX[™]) ke kompresi vzestupných cév.
- Když je CELOX[™] PPH zaveden, musíte po dostatečně dlouhou dobu, podle klinického úsudku, aplikovat kompresi umožňující hemostázu.
- Pečlivě sledujte pacientku, zda nevykazuje známky opětovného krvácení (např. podle klinických příznaků, monitorování krevních hodnot a pomocí ultrazvukových skenů, pokud máte k dispozici).
- Léčba oxytociky/uterotonickými léky může během této doby pokračovat.
- Pokud poporodní krvácení pokračuje, vyjměte CELOX[™] PPH a pokračujte další fází standardní péče/protokolu pro poporodní krvácení.

Odstranění

- CELOX[™] PPH lze odstranit vytažením za ponechaný konec ven z vagíny.
- Po vyjmutí zkontrolujte konec tkaniny, zda má neporušený okraj, posuďte celistvost a úplnost. Pokud pozorujete neúplné odstranění nebo máte podezření, proveďte adekvátní revizní opatření. Uvnitř nesmí zůstat žádné útržky tkaniny.
- Použitý CELOX[™] PPH zlikvidujte v souladu se standardními nemocničními postupy pro klinický odpad.

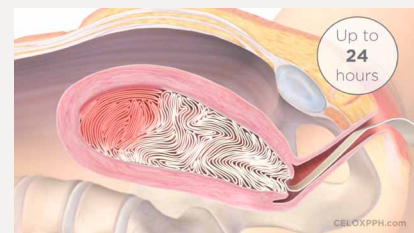

- Předpokládá se, že uvolněné zbytkové granule nebo gelovitý materiál z CELOX[™] PPH budou vyloučeny v lochii pacientky a případně po opětovném zahájení menstruace. To může být potenciálně několik týdnů po použití. Tyto informace sdělte pacientce.

Pro více informací navštivte: www.celoxpph.com

Distribuce pro ČR:

Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
541 422 070 objednavky@dahl.cz www.dahlhausen.cz