

WOUNDCLOT™




Every
drop is
Precious™

Core Scientific Creations Ltd. 29 Nahshon Street 4926918 Petah Tikva, Israel
www.woundclot.org | info@woundclot.com | +972-3-735-9555

HEMODIALYSIS



WoundClot™ Hemodialysis

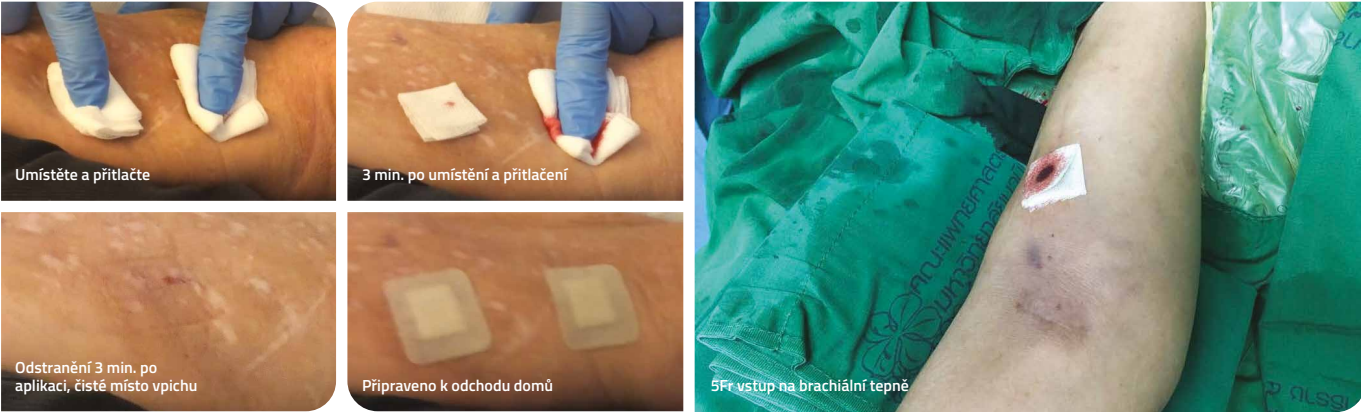

Představujeme WoundClot™ Hemodialysis

WoundClot™ je revoluční hemostatická tkanina nové generace. Rychle a snadno se aplikuje na místo vstupu, kde WoundClot™ přichází do kontaktu s krví a mění se v jedinečnou, patentovanou 3D gelovou matici.

- Přilne k místu vstupu pod minimálním tlakem.
- Absorbuje až 25-násobek své původní hmotnosti
- Rychle zastaví krvácení aktivací koagulačních faktorů.

Skvělý pro pacienty

WoundClot™ Hemodialysis usnadňuje pacientům hemodialýzu

- Vysoká úroveň bezpečnosti: je hypoalergenní, bez kontraindikací a toxicity.
- Účinný u pacientů s koagulopatií, antikoagulační nebo antiagregační terapií.
- Minimální tlak potřebný k přilnutí WoundClot™ Hemodialysis nezpůsobuje distenzi cév.

Skvělý pro zdravotnický personál

WoundClot™ Hemodialysis šetří drahocenný čas zdravotnického personálu

- Snadná aplikace; po aplikaci není nutná manuální komprese.
- Rychlé srážení krve umožní pacientům trávit méně času v hemodialyzačním centru.
- Snadné odstranění bez obnovy krvácení.

Skvělý pro zdravotnická zařízení

WoundClot™ Hemodialysis pomáhá zdravotnickým zařízením k dosažení stanovených cílů

- Vyžaduje minimální školení.
- Certifikace CE třídy IIb a FDA.
- Trvanlivost 5 let.

Jak funguje WoundClot™ Hemodialysis?

Jedinečná struktura celulózy WoundClot™ Hemodialysis svou funkcí posiluje třemi způsoby přirozené schopnosti lidského těla. Aby byl účinný, nevyžaduje aplikaci manuální komprese, takže se zdravotnický personál může věnovat jiným úkolům.

- **Kryje místo vstupu**
V místě aplikace přichází WoundClot™ do kontaktu s krví a v důsledku její rozsáhlé absorpce se mění jeho jedinečná celulózová struktura na expandující gelovou membránu, která přilne k povrchu rány.
- **Chrání místo vstupu**
Řetězce polymerů ve struktuře celulózy WoundClot™ tvoří silnou, flexibilní gelovou bariéru, která chrání ránu po vstupu.
- **Zastavuje krvácení**
WoundClot™ účinně zastavuje krvácení několika účinnými mechanismy: rychlá absorpce krve, agregace krevních destiček, červených krvinek (RBC) a aktivace koagulačních faktorů.

Jak se WoundClot™ odstraňuje?

WoundClot™ se díky své jedinečné textuře snadno odstraňuje bez rizika obnovy krvácení

- Odlepte WoundClot™ z místa vstupu.
- Odstraňte sraženinu.
- Odstraňte veškeré zbytky opláchnutím místa fyziologickým roztokem nebo vodou.

Jaké jsou další jedinečné vlastnosti WoundClot™ Hemodialysis?

- **Není extermický**
Nezpůsobuje tepelné poranění a nedegraduje koagulaci.
- **Neoxidovaná celulóza**
Skládá se z neoxidované, neregenerované celulózové struktury (NONRCS).
- **Nedráždivý**
Nevyvolává alergické reakce a podráždění pokožky.

Informace pro objednání

WoundClot™ ABC Hemodialysis je k dispozici v následujících rozměrech:

Katalogové číslo	Popis	Balení
102055102	WoundClot™ ABC Twin Pack 2x 5 cm x 5 cm	10 ks
102022102	WoundClot™ ABC Twin Pack 2x 2,5 cm x 2,5 cm	10 ks



Hemodialysis

Veterinary

Trauma

Surgical

OTC